

French

iHealth  
COVID-19  
Antigen Rapid Test

**Self-Test  
At Home  
Results In  
15 Mins**

# Mode d'emploi du test rapide d'antigène COVID-19

## Étape 1 : Préparer les matériaux

## Step 1: Prepare Material

Vous pouvez avoir le dispositif de test 1 ou le dispositif de test 2 dans l'emballage. Veuillez suivre les étapes appropriées en fonction du dispositif spécifique que vous avez reçu.

### DISPOSITIF DE TEST 1:

#### Test Set 1:

Ouvrez l'emballage, sortez la carte de test de COVID-19 qui est en pochette, le Tube pré-rempli avec la solution d'extraction et l'écouvillon. Lorsque vous êtes prêt à procéder au test, ouvrez la pochette en aluminium de la carte de test Covid-19.



1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Empty Tube and 1 Sealed Solution



1 Swab

### DISPOSITIF DE TEST 2:

#### Test Set 2:

Ouvrez l'emballage, sortez la carte de test COVID-19 qui est en pochette, le tube vide, la solution scellée et l'écouvillon. Lorsque vous êtes prêt à procéder au test, ouvrez la pochette en aluminium de la carte de test Covid-19.



1 COVID-19 Test Card in Pouch



1 Pre Filled Tube



1 Swab

## Étape 2 : Recueillir l'échantillon

## Step 2: Collect Sample

**A.** Retirez l'écouvillon de son emballage en veillant à ne pas toucher le bout de l'écouvillon. Veuillez conserver l'emballage de l'écouvillon pour une utilisation ultérieure.

**B.** Insérez délicatement toute la pointe absorbante de l'écouvillon (généralement  $\frac{1}{2}$  à  $\frac{3}{4}$  de pouce) dans votre narine.

**C.** Brossez fermement et lentement l'intérieur des narines dans un mouvement circulaire contre la paroi nasale au moins 5 fois. Prenez au moins 15 secondes pour prélever l'échantillon et assurez-vous de prélever tout écoulement nasal sur l'écouvillon. En utilisant le même écouvillon, répétez la même procédure de prélèvement d'échantillon pour l'autre narine. Assurez-vous d'utiliser le MÊME ÉCOUVILLON pour les DEUX narines.



## Étape 3 : Échantillon de processus


## Step 3: Process Sample

**A.** Appuyez sur le tube verticalement sur la table et tournez le grand capuchon orange pour l'ouvrir.

**B.** Insérez l'écouvillon dans le tube, touchez le fond du tube avec la pointe de l'écouvillon et remuez au moins 15 fois.

**C.** Pressez les côtés du tube pour extraire autant de liquide que possible de l'écouvillon, puis retirez l'écouvillon.

**D.** Revissez le grand capuchon orange, remettez l'écouvillon dans l'emballage. Jetez l'écouvillon et l'emballage en toute sécurité.

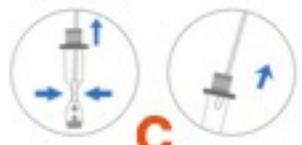

## Étape 4 : Ajouter un échantillon

### Step 4: Add Sample

Tournez pour ouvrir le petit capuchon blanc du tube. Ajoutez 3 gouttes d'échantillon au port d'échantillon de la carte de test COVID-19. Revissez le petit capuchon blanc.



## Étape 5 : Attendez 15 minutes

### Step 5: Wait 15 minutes


Démarrez la minuterie en cliquant sur le bouton "Start Timer" sur l'application, immédiatement après avoir ajouté l'échantillon au port d'échantillon. Le résultat sera prêt en 15 minutes.



## Étape 6 : Lire le résultat

### Step 6: Read Results

Les résultats ne doivent pas être prêts qu'après 30 minutes (résultat affiché à un grossissement 2X).

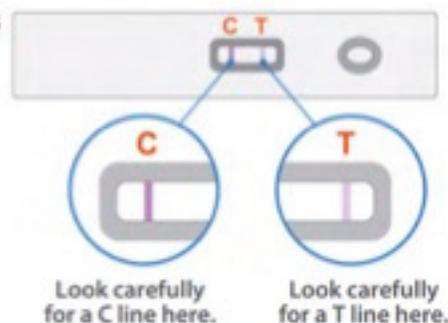


## Étape 7 : Explication des résultats des tests

### Step 7: Test Result Explanation

#### Résultat positif:

Un résultat POSITIF doit montrer À LA FOIS une ligne C (VIOLET CLAIR) et une ligne T (VIOLET FONCÉ). Un résultat positif signifie que des antigènes viraux de COVID-19 ont été détectés et que l'individu est positif à la COVID-19. Les personnes dont le test est positif doivent s'isoler et demander des soins de suivi à leur médecin ou à leur fournisseur de soins de santé, car des tests supplémentaires et des rapports de santé publique peuvent être nécessaires.

#### Positive Result

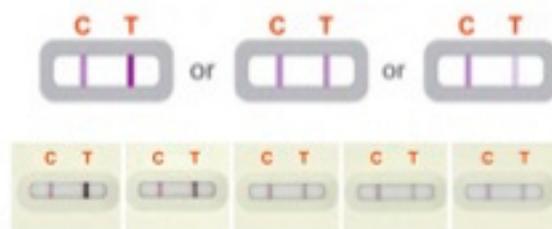

#### Résultat négatif:

Un résultat négatif affichera UNIQUEMENT une ligne C (VIOLET CLAIR). Un résultat négatif signifie que les antigènes viraux de la COVID-19 n'ont pas été détectés et que l'individu est présumé négatif pour la COVID-19.

#### Negative Result



- Veuillez noter que les résultats négatifs n'excluent pas le COVID-19
- En cas de résultat de test négatif : Continuez à suivre toutes les mesures de distanciation sociale, les recommandations et à prendre des mesures de protection. Si les soupçons d'infection persistent et/ou si votre premier test est négatif, répétez le test après 1 à 2 jours et consultez votre fournisseur de soins de santé ou votre centre COVID-19 local.

## Étape 8 : Jeter le kit de test

### Step 8: Dispose of Test Kit

Une fois le test terminé, jetez les composants du kit à la poubelle

See more at  
[AnchoragePLNs.org](https://AnchoragePLNs.org)

